

Medisorb G

Rehydrateert necrotisch weefsel

Medisorb G

Steriel hydrogelverband

#### Beschrijving

Medisorb G is een heldere, mild gelatineuze gel. Medisorb G creëert en onderhoudt een vochtig wondmilieu dat de wondgenezing bevordert en versnelt.

#### Werkingsmechanisme

Afhankelijk van het type wond kan de wondgel worden gebruikt om zwart, droog necrotisch weefsel zacht te maken en te rehydrateren, waardoor het debridementproces in gang wordt gezet. Het kan ook worden gebruikt om een vochtig wondmilieu te creëren tijdens de granulatiefase. Dankzij de samenstelling kleeft de wondgel niet aan het wondoppervlak, wat het risico op beschadiging van gezonde cellen minimaliseert en ervoor zorgt dat het verwisselen van verband niet pijnlijk is voor de patiënt.

#### Indicaties

Medisorb G kan worden gebruikt voor wonden met droge of vervloeiende necrose, zoals decubitus of ulcera aan het onderbeen.

#### Aanwijzingen voor gebruik

Gebruik strikt volgens de aanwijzingen op de bijsluiter en onder toezicht van een arts of verpleegkundige, die ervoor zorgt dat de wondgel op de juiste wijze wordt aangebracht.

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de wondgel aanbrengt. Het verband moet worden afgedekt een secundair verband en vervolgens gefixeerd worden.

Bij necrotische wonden moet Medisorb G elke 24 uur worden verwisseld. Bij niet geïnfecteerde wonden kan de gel maximaal 3 dagen op de wond blijven zitten. Om de gel van de wond te verwijderen, spoelt u deze met 0,9% zoutoplossing.

#### Aanvullende opmerkingen

In het beginstadium van de behandeling met Medisorb G kan de wond groter worden. Dit is een normale reactie en wordt veroorzaakt door het debridement van de wondranden in de vroege stadia van genezing. Geïnfecteerde wonden mogen alleen onder medisch toezicht met het verband worden behandeld. Elk verband is bedoeld voor eenmalig gebruik bij één patiënt. Ongebruikte porties moeten worden weggegooid.

#### Contra-indicaties

Gebruik dit product niet bij patiënten met een bekende allergie voor de wondgel, op derdegraads brandwonden of als de verpakking beschadigd of geopend is.