

## Gebruiksaanwijzing Medisorb A

Alginaat wondverband, steriel

### Productomschrijving

**Medisorb A** is een steriel wondverband welke calcium alginaat bevat. Het is bedoeld om rechtstreeks op de wond te worden aangebracht.

### Werking

Wanneer het alginaat in aanraking komt met het exsudaat wordt er een zachte gel gevormd. Zo wordt er een vochtige wondomgeving gecreëerd wat het proces van de wondgenezing bevordert. De gel staat gasuitwisseling bij het wondoppervlak toe en biedt tevens bescherming tegen letsel door secundair verband.

Doordat exsudaat na aanraking met het alginaat wordt omgezet in een gel wordt maceratie van de wondranden en omliggende huid voorkomen.

**Medisorb A** heeft de eigenschap zich aan te passen aan de vorm van de wond en vult de wond op. Hiermee wordt de wond beschermt tegen uitdroging.

**Medisorb A** minimaliseert het risico op beschadiging van de wondbodem bij verbandwissels waardoor het wondgenezingsproces niet wordt verstoort.

### Indicaties

**Medisorb A** heeft door de toevoeging van calcium alginaat een zeer absorberend vermogen en is daarom geschikt voor toepassing bij matig tot sterk exsuderende wonden.

Het kan worden ingezet bij de volgende wondtype;

- Ulcus Cruris
- Decubitus wonden
- Complex genezende wonden
- Trauma wonden

### Contra indicaties

**Medisorb A** kan niet worden toegepast bij;

- 3<sup>e</sup> graad brandwonden
- Direct op chirurgische implantaten
- Blootliggende spieren, botten of pezen
- Gelijktijdig gebruik met antiseptica wordt afgeraden omdat er een negatieve wisselwerking kan zijn tussen beide productgroepen

### Gebruiksaanwijzing

1. Reinig de wond met water of zoals beschreven in het behandelplan
2. Maak de huid rondom de wond voorzichtig droog
3. Kies het juiste formaat **Medisorb A** welke het wondoppervlak geheel bedekt en 2-3 cm rondom de wond overlapt. Voor een groter oppervlak kunnen meerdere, **Medisorb A** verbanden worden aangebracht
4. Breng **Medisorb A** direct op het wondoppervlak aan waarbij het contact moet maken met de wondbodem.
5. Er is secundaire fixatie nodig bij het gebruik van **Medisorb A**, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat kan dit een absorberend verband of een schuimverband zijn.
6. **Medisorb A** kan worden toegepast in combinatie met compressie therapie

7. Verwissel het wondverband wanneer de wondbodem bedekt is met een laag gel. De tijd tussen twee verbandwissels is afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de fase waarin de wond zich bevindt. Bij sterk exsuderende wonden kan het noodzakelijk zijn om te starten met dagelijkse wissels. Als de productie van het exsudaat afneemt mag Medisorb A langer blijven zitten. Medisorb A mag tot 7 dagen blijven zitten bij een niet geïnfecteerde wond. Bij een geïnfecteerde wond moet het Medisorb A dagelijks vervangen worden.

#### **Aanvullende informatie**

- Allergische reacties en de ontwikkeling van een onaangename geur worden sterk verminderd door de afwezigheid van gelatine in het product.
- De semipermeabele polyurethaan film laag beschermt de wond tegen bacteriën en water van buitenaf
- Door de sterk absorberende eigenschappen van het wondverband wordt overmatige exsudatie geëlimineerd, waardoor de tijd tussen de verbandwissels verlengt kan worden
- Medisorb H bevordert het genezingsproces door een optimaal vochtig wondmilieu te creëren voor de vorming van nieuw granulatieweefsel
- Visuele controle van de wond is mogelijk door de lichte transparante eigenschappen van **Medisorb H**

#### **Aanvullende informatie**

- **Medisorb A** is voor eenmalig gebruik
- Direct na opening gebruiken en geen restjes van het verband bewaren
- Bij voorkeur niet knippen in het verband, als dit wel noodzakelijk is dan gebruik maken van een steriele schaar.
- Bij de start van de behandeling kan het lijken dat de wond in omvang toeneemt, dit is normaal en is een gevolg van de reinigende werking van het verband waarbij ook de wondranden worden gereinigd.
- **Medisorb A** niet gebruiken na de verval datum
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is

#### **Bewaaradvies**

- Niet blootstellen aan direct zonlicht
- Bewaren bij een temperatuur van 15° tot 25°C.
- Bewaren in een schone en niet te vochtige omgeving.
- In originele doos en verpakking bewaren

#### **Mogelijke complicaties**

Tot op heden zijn er nog geen complicaties gemeld.

Hoewel er geen meldingen bekend zijn voor overgevoeligheidsreacties op het verband dient men wel voorzichtig te zijn bij gebruik bij patiënten die overgevoelig zijn voor hydrocolloïd