

Gebruiksaanwijzing Medisorb P Plus Adhesive

Zelfklevend, absorberend polyurethaan wondverband, steriel

Productomschrijving

Medisorb P Plus Adhesive is een steriel schuimverband bestaande uit twee lagen;

- Hydrofiel polyurethaanschuim, een zachte elastische laag die bijdraagt aan het bereiken van een vochtig wondmilieu. Door de speciale “porie-in-porie” structuur heeft deze laag een hoog absorptie vermogen
- Semipermeabele polyurethaan filmlaag – deze laag beschermt de wond tegen invloeden van buitenaf
- Hypoallergene kleeftlaag van acryllijm
- Silicone wondcontactlaag beschermstrook op de kleeftlaag

Indicaties

Medisorb P Plus Adhesive kan worden toegepast bij exsuderende wonden

- Complex genezende wonden
- Ulcus cruris
- Decubitus
- Post traumatische wonden

Medisorb P Plus is geschikt voor het verwijderen van necrose en purulent exsudaat uit de wond

Contra indicaties

- Wonden met droge zwarte necrose
- Stelpen van bloedingen
- Wonden in lichaamsholtes

Gebruiksaanwijzing

- Reinig de wond met water of volgens het behandelplan
- Maak de huid rondom de wond voorzichtig droog
- Kies de juiste maat **Medisorb P Plus Adhesive**, rondom de wond moet er minimaal 2 cm overlap zijn. Het verband mag op maat geknipt worden
- Open de verpakking en verwijderd de beschermfolie
- Breng **Medisorb P Plus Adhesive** met de juiste kant aan op de wond, de poreuze zijde van het verband komt op de wond
- **Medisorb P Plus Adhesive** dient te worden gefixeerd, bijvoorbeeld met volvlakfixatie of een verbandwindsel.
- Bij sterk exsuderende wonden dient er dagelijks een verbandwissel plaats te vinden, of in elk geval als het verband verzadigd is. Bij licht tot matig exsuderende wonden mag **Medisorb P Plus Adhesive** tot maximaal 5 dagen op de wond blijven zitten.
- **Medisorb P Plus Adhesive** kan worden gebruikt i.c.m. antibiotica, wondreiniginggel of andere verbandmiddelen die direct op de wond gaan en een absorberende afdekking nodig hebben.
- Als bij verwijderen de **Medisorb P Plus Adhesive** aan de wond kleeft maak deze dan vochtig met water waardoor verwijderen makkelijk gaat en kwetsbaar, nieuw gevormd weefsel wordt beschermd.

Aanvullende informatie

- **Medisorb P Plus Adhesive** is voor eenmalig gebruik
- Direct na opening gebruiken en geen restjes van het verband bewaren
- Bij voorkeur niet knippen in het verband, als dit wel noodzakelijk is dan gebruik maken van een steriele schaar.
- **Medisorb P Plus Adhesive** niet gebruiken na de verval datum
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is

Bewaaradvies

- Niet blootstellen aan direct zonlicht
- Bewaren bij een temperatuur van 15° tot 25°C.
- Bewaren in een schone en niet te vochtige omgeving.
- In originele doos en verpakking bewaren

Mogelijke complicaties

Tot op heden zijn er nog geen complicaties gemeld.

Hoewel er geen meldingen bekend zijn voor overgevoeligheidsreacties op het verband dient men wel voorzichtig te zijn bij gebruik bij patiënten die overgevoelig zijn voor acryllijm of polyurethaan schuim

Laatst bijwerkt: 11-2024