

Gebruiksaanwijzing Medisorb H

Hydrocolloïd wondverband, steriel

Productomschrijving

Medisorb H is een steriel wondverband dat bestaat uit een hydrocolloïd wondcontactlaag zonder gelatine en een dunne semipermeabele polyurethaan filmlaag welke een barrière vormt voor bacteriën, virussen en water.

Werking

Wanneer de hydrocolloïd wondcontactlaag in aanraking komt met exsudaat wordt er een cohesieve gel gevormd. De gel absorbeert wondvocht en creëert een vochtig wondmilieu, waardoor het wondgenezing proces wordt gestimuleerd.

Een vochtig wondmilieu ondersteunt het granulatie en epitheelisatie proces

Gelvorming voorkomt verkleaving van het verband met de wond zodat het verband vrijwel pijnloos kan worden verwijderd en kwetsbaar, nieuw gevormd weefsel niet wordt beschadigd.

Indicaties

Medisorb H is voor een vochtige wondbehandeling en kan worden toegepast bij de behandeling van licht tot matig exsuderende wonden zoals;

- Ulcus Cruris
- Decubitus wonden
- Complex genezende wonden
- 2^e graads brandwonden

Contra indicaties

Medisorb H kan niet worden toegepast bij;

- 3^e graad brandwonden
- Blootliggende spieren, botten of pezen.

Gebruiksaanwijzing

1. Reinig de wond met water of zoals beschreven in het behandelplan
2. Maak de huid rondom de wond voorzichtig droog
3. Kies het juiste formaat **Medisorb H** welke het wondoppervlak geheel bedekt en 2-3 cm rondom de wond overlapt. Voor een groter oppervlak kunnen meerdere, overlappende, **Medisorb H** verbanden worden aangebracht
4. Verwijder de beschermstrip en breng **Medisorb H** direct aan op het wondoppervlak, druk de hoeken zacht aan en zorg dat het verband over de gehele oppervlakte contact maakt met de huid
5. Er is geen secundaire fixatie nodig bij het gebruik van **Medisorb H**
6. Verwissel het wondverband wanneer de hydrocolloïd laag compleet is veranderd in een gel. De frequentie van de verbandwisseling is afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat uit de wond. Bij sterk exsuderende wonden dient het verband dagelijks verwisseld te worden. Bij licht tot matig exsuderende wonden of bij epithelialiserende wonden mag het verband tot maximaal 7 dagen op de wond blijven.

Aanvullende informatie

- Allergische reacties en de ontwikkeling van een onaangename geur worden sterk verminderd door de afwezigheid van gelatine in het product.
- De semipermeabele polyurethaan film laag beschermt de wond tegen bacteriën en water van buitenaf
- Door de sterk absorberende eigenschappen van het wondverband wordt overmatige exsudatie geëlimineerd, waardoor de tijd tussen de verbandwissels verlengt kan worden
- Medisorb H bevordert het genezingsproces door een optimaal vochtig wondmilieu te creëren voor de vorming van nieuw granuultweefsel
- Visuele controle van de wond is mogelijk door de lichte transparante eigenschappen van **Medisorb H**

Aanvullende informatie

- **Medisorb H** is voor eenmalig gebruik
- Direct na opening gebruiken en geen restjes van het verband bewaren
- Bij voorkeur niet knippen in het verband, als dit wel noodzakelijk is dan gebruik maken van een steriele schaar.
- **Medisorb H** niet gebruiken na de verval datum
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is

Bewaaradvies

- Niet blootstellen aan direct zonlicht
- Bewaren bij een temperatuur van 15° tot 25°C.
- Bewaren in een schone en niet te vochtige omgeving.
- In originele doos en verpakking bewaren

Mogelijke complicaties

Tot op heden zijn er nog geen complicaties gemeld.

Hoewel er geen meldingen bekend zijn voor overgevoeligheidsreacties op het verband dient men wel voorzichtig te zijn bij gebruik bij patiënten die overgevoelig zijn voor hydrocolloïd

Laatst bijwerkt: 11-2024