

Gebruiksaanwijzing Medisorb Silver Pad

Absorberend wondverband met Zilver, steriel

Productomschrijving

Medisorb Silver Pad is een steriel, niet verklevend absorberend wondverband n bedekt met een laagje zilver voor een bacteriedodende werking wat de behandeling van complex infecteerde wonden ondersteunt. Overtollig exsudaat wordt opgenomen in het verband wat zorgt voor een optimaal vochtig wondmilieu

- Absorberend niet verklevend verband
- Een ideaal vochtig wondmilieu voor optimale genezing wordt gecreëerd
- Zilverionen hebben een antibacteriële werking
- Zilver werkt op een breed spectrum bacteriën zoals oa MRSA, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus
- De zelfklevende rand bevat hypoallergene lijm op acryl basis.

Indicaties

Medisorb Silver Pad kan worden toegepast als lokale behandeling bij exsuderende wonden met een infectie of een verhoogd risico op infectie.

- Complex genezende wonden
- Ulcus cruris
- Decubitus
- Post traumatische wonden

Contra indicaties

- Wonden met droge zwarte necrose
- Stelpen van bloedingen
- Wonden in lichaamsholtes
- Niet gebruiken i.c.m. met zalven, crèmes, poeders en desinfectans
- Bij bekende allergie voor zilver, chitosan of polyurethaan
- Niet gebruiken wanneer patient gediagnostiseerd is met argyrie
- Verband verwijderen voordat MRI gemaakt wordt.

Gebruiksaanwijzing

- Reinig de wond met water of volgens het behandelplan
- Maak de huid rondom de wond voorzichtig droog
- Kies de juiste maat **Medisorb Silver Pad**, rondom de wond moet er minimaal 2 cm overlap zijn. Het verband mag niet op maat geknipt worden.
- Open de verpakking en verwijderd de beschermfolie
- Zorg ervoor dat bij het aanbrengen de actieve kant niet met de handen wordt aangeraakt.
- Breng **Medisorb Silver Pad** met de juiste kant aan op de wond, de zilver gekleurde zijde van het verband komt op de wond
- Bij sterk exsuderende wonden dient er dagelijks een verbandwissel plaats te vinden, of in elk geval als het verband verzadigd is. Bij licht tot matig exsuderende wonden mag **Medisorb Silver Pad** tot maximaal 5 dagen op de wond blijven zitten.

- Als bij verwijderen de **Medisorb Silver Pad** aan de wond kleeft maak deze dan vochtig met water waardoor verwijderen makkelijk gaat en kwetsbaar, nieuw gevormd weefsel wordt beschermd.

Aanvullende informatie

- **Medisorb Silver Pad** is voor eenmalig gebruik
- Direct na opening gebruiken en geen restjes van het verband bewaren
- Bij voorkeur niet knippen in het verband, als dit wel noodzakelijk is dan gebruik maken van een steriele schaar.
- **Medisorb Silver Pad** niet gebruiken na de verval datum
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
- Sterilisatie d.m.v. ethyleenoxide

Bewaaradvies

- Niet blootstellen aan direct zonlicht
- Bewaren bij een temperatuur van 15° tot 25°C.
- Bewaren in een schone en niet te vochtige omgeving.
- In originele doos en verpakking bewaren

Mogelijke complicaties

Bij verkleving aan de wond voorzichtig los weken met water of fysiologisch zout

Lokale allergische reacties kunnen optreden bij patiënten die overgevoelig zijn voor zilver

Bij sommige patiënten die bijzonder gevoelig zijn voor contact met zilver kan argyrie optreden na langdurig gebruik en frequente (dagelijkse) verbandwissels.

Bij verkleuring van de wond of de huid rondom de wond behandeling stoppen en overleggen met behandelend arts.

Laatst bijwerkt: 11-2024