

Gebruiksaanwijzing Medisorb R AG

Resorbeerbare dressing met zilver

Productomschrijving

Medisorb R AG is een steriele resorbeerbare wondbedekker met zilver in de vorm van een poreuze film

- **Medisorb R AG** zorgt voor afvoer van exsudaat
- Beschermt door de resorptie capaciteit nieuw en kwetsbaar weefsel
- Bestaat uit butyryl-acetyl chitine co polyesters die afvoer van exsudaat ondersteunen
- Door het resorptie vermogen is de verbandwissel over het algemeen pijnloos
- Door de toevoeging van micro zilver, bekend om zijn anti bacteriele eigenschappen is het instaat wondinfectie te verminderen en te voorkomen.

Indicaties

Medisorb R AG kan worden toegepast bij diepe, exsuderende wonden

- Complex genezende wonden
- Ulcus cruris
- Decubitus
- Post traumatische wonden
- Zowel geïnfecteerde als niet geïnfecteerde wonden

Contra indicaties

Er is geen informatie bekend over het sensibiliserende effect van de wondbedekker. Extra aandacht is noodzakelijk indien er sprake of een vermoeden is van allergie voor chitine, zijn dervaten en zilver.

Bij patiënten bekend met argyria **Medisorb R AG** niet inzetten.

Medisorb R AG mag niet worden gebruikt op een droge, necrotische wond.

Gebruiksaanwijzing

- Reinig de wond met water of volgens het behandelplan
- Maak de huid rondom de wond voorzichtig droog
- Open de verpakking van **Medisorb R AG**, door aan de tegenoverliggende randen te trekken tot er weerstand ontstaat. De zijkanten mogen niet scheuren.
- Rol de verpakking uit
- Breng de **Medisorb R AG** aan op de wondbodem totdat deze volledig bedekt is, als het wondoppervlak te groot is kunnen meerdere verpakkingen worden gebruikt.
- **Medisorb R AG** dient te worden afgedekt met een absorberend verband en vervolgens te worden gefixeerd, bijvoorbeeld met volvlakfixatie of een verbandwindsel.
- Bij sterk exsuderende wonden dient er dagelijks een verbandwissel plaats te vinden, of in elk geval als **Medisorb R AG** volledig is opgenomen door de wondbodem. Bij licht tot matig exsuderende wonden mag **Medisorb R AG** tot maximaal 5 dagen op de wond blijven zitten.

Aanvullende informatie

- **Medisorb R AG** is voor eenmalig gebruik

- Direct na opening gebruiken en geen restjes van het poeder bewaren
- **Medisorb R AG** niet gebruiken na de verval datum
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
- Bij optreden van een allergische reactie de behandeling met **Medisorb R AG** direct stoppen en contact met behandelend arts opnemen.

Bewaaradvies

- Niet blootstellen aan direct zonlicht
- Bewaren bij een temperatuur van 15° tot 25°C.
- Bewaren in een schone en niet te vochtige omgeving.
- In originele doos en verpakking bewaren

Mogelijke complicaties

Tot op heden zijn er nog geen complicaties gemeld.

Hoewel er geen meldingen bekend zijn voor overgevoelighedsreacties op het verband dient men wel voorzichtig te zijn bij gebruik bij patiënten die overgevoelig zijn voor chitine en zijn dervaten. Niet gebruiken bij patiënten met argyria

Laatst bijwerkt: 11-2024