

## Gebruiksaanwijzing Medisorb P Silver

Absorberend schuimverband met zilver, steriel

### Productomschrijving

**Medisorb P Silver** is een modern, actief wondverband met een bacteriedodende werking wat de behandeling van complex infecteerde wonden ondersteunt.

- Hydrofiel polyurethaanschuim, een zachte elastische laag die bijdraagt aan het bereiken van een vochtig wondmilieu. Door de speciale “porie-in-porie” structuur heeft deze laag een hoog absorptie vermogen
- Semipermeabele polyurethaan filmlaag – deze laag beschermt de wond tegen invloeden van buitenaf
- Een actieve laag met chitosan en zilver welke zorgt voor de anti-bacteriële werking van het verband.

### Indicaties

**Medisorb P Silver** kan worden toegepast bij exsuderende wonden met een infectie of een verhoogd risico op infectie.

- Complex genezende wonden
- Ulcus cruris
- Decubitus
- Post traumatische wonden

### Contra indicaties

- Wonden met droge zwarte necrose
- Stelpen van bloedingen
- Wonden in lichaamsholtes
- Niet gebruiken icm met zalven, crèmes, poeders en desinfectans
- Bij bekende allergie voor zilver, chitosan of polyurethaan
- Niet gebruiken wanneer patient gediagnostiseerd is met argyrie

### Gebruiksaanwijzing

- Reinig de wond met water of volgens het behandelplan
- Maak de huid rondom de wond voorzichtig droog
- Kies de juiste maat **Medisorb P Silver**, rondom de wond moet er minimaal 2 cm overlap zijn. Het verband mag op maat geknipt worden
- Open de verpakking en verwijderd de beschermfolie
- Breng **Medisorb P Silver** met de juiste kant aan op de wond, de geel/bruin gekleurde zijde van het verband komt op de wond
- **Medisorb P Silver** dient te worden gefixeerd, bijvoorbeeld met volvlakfixatie of een verbandwindsel.
- Bij sterk exsuderende wonden dient er dagelijks een verbandwissel plaats te vinden, of in elk geval als het verband verzadigd is. Bij licht tot matig exsuderende wonden mag **Medisorb P Silver** tot maximaal 5 dagen op de wond blijven zitten.
- Als bij verwijderen de **Medisorb P Silver** aan de wond kleeft maak deze dan vochtig met water waardoor verwijderen makkelijk gaat en kwetsbaar, nieuw gevormd weefsel wordt beschermd.

**Aanvullende informatie**

- **Medisorb P Silver** is voor eenmalig gebruik
- Direct na opening gebruiken en geen restjes van het verband bewaren
- Bij voorkeur niet knippen in het verband, als dit wel noodzakelijk is dan gebruik maken van een steriele schaar.
- **Medisorb P Silver** niet gebruiken na de verval datum
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is

**Bewaaradvies**

- Niet blootstellen aan direct zonlicht
- Bewaren bij een temperatuur van 15° tot 25°C.
- Bewaren in een schone en niet te vochtige omgeving.
- In originele doos en verpakking bewaren

**Mogelijke complicaties**

Bij verkleving aan de wond voorzichtig los weken met water of fysiologisch zout

Lokale allergische reacties kunnen optreden bij patiënten die overgevoelig zijn voor polyurethaan of chitosan.

Bij sommige patiënten die bijzonder gevoelig zijn voor contact met zilver kan argyrie optreden na langdurig gebruik en frequente (dagelijkse) verbandwissels.

Bij verkleuring van de wond of de huid rondom de wond behandeling stoppen en overleggen met behandelend arts.

Laatst bijwerkt: 11-2024