

## **Medisorb A**

Steriel calcium alginaat verband voor toepassing bij wonden met fibrineus beslag.

### **Productomschrijving**

Medisorb A is een steriel, sterk absorberend calcium alginaat wondverband.

Het wordt ingezet bij matig tot sterk exsuderende oppervlakkige en diepe wonden met geel, al dan niet fibrineus, beslag.

Calcium alginaat vormt in aanraking met wondvocht een gel

De gel staat gasuitwisseling toe, het creëert een vochtig wondmilieu en zorgt hierdoor voor oplossing van geel en/of fibrineus beslag

De gel hecht niet aan het wondoppervlak, waardoor geen beschadiging van nieuw weefsel wordt veroorzaakt.

Het calcium alginaat wondverband zorgt voor een verticale absorptie van exsudaat, waardoor er geen maceratie van de wondranden ontstaat.

Medisorb A is in staat om twee maal zijn eigen gewicht te absorberen en zich te vormen naar de wondbodem.

Het wordt ingezet voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden.

Het wondverband kan tot 7 dagen op de wond blijven. Het wondverband wordt afgedekt met een secundair wondverband.

Als de wond te droog is kan de Medisorb A bevochtigd worden met NACL 0.9%.

Bij verwijderen zorgen dat het de Medisorb A goed verzadigd is, anders bevochtigen met NACL 0.9% om beschadiging van de wond te voorkomen.

### **Indicaties**

Medisorb A is een sterk absorberend verband voor de behandeling van wonden met matig tot sterk exsudaat en wonden met geel, al dan niet fibrineus, beslag.

Medisorb A kan worden gebruikt voor de behandeling van wonden zoals

- Decubitus,
- Veneuze en arteriële ulcera
- Diabetische voet,
- Transplantaat donorplaatsen en
- Complexe wonden.

### **Aanwijzingen voor gebruik**

Gebruik strikt volgens de aanwijzingen op de bijsluiter en onder toezicht van een arts of verpleegkundige.

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het verband aanbrengt.

Het verband moet worden verwisseld zodra het oppervlak van Medisorb A volledig in gel is veranderd. Het interval tussen verbandwisselingen hangt af van de conditie van de wond en het exsudaatvolume.

Het verband moet worden afgedekt met een secundair verband. Het mag alleen op geïnfecteerde wonden worden aangebracht op voorschrift van en onder toezicht van een arts en tijdens een geschikte antibacteriële behandeling. Als de wond geïnfecteerd is met anaerobe micro-organismen, wordt het niet aanbevolen om Medisorb A af te dekken met occlusief verband.

### **Aanvullende opmerkingen**

In het beginstadium van de behandeling met Medisorb A kan de wond groter worden. Dit is een normale reactie en wordt veroorzaakt door het debridement van de wondranden in de vroege stadia van genezing. Het effect van behandeling met Medisorb A kan minder zijn dan verwacht als het verband wordt aangebracht op een zeer droge en/of necrotische wond.

### **Contra-indicaties**

Medisorb A mag niet worden gebruikt voor het verbinden van chirurgische transplantaten of derdegraads brandwonden. Soms kan kort na het aanbrengen een licht en meestal voorbijgaand gevoel van trekken optreden. Bevochtig de wond onmiddellijk voor het aanbrengen met steriele 0,9% zoutoplossing om dit soort ongemak te voorkomen. Gelijktijdig gebruik van Medisorb A en middelen als antiseptica of antibiotica wordt afgeraden, omdat Medisorb A de heilzame werking van deze middelen kan verminderen of remmen.

### **WCS Classificatiemodel**

Medisorb A is geschikt voor toepassing bij wonden die zich in de **gele** en **rode** genezingsfase bevinden.

Medisorb A kan ook worden ingezet bij wonden die tekenen van infectie vertonen.

Meer informatie over de verschillende wondfases vindt u hier [https://www.wcs.nl/wp-content/uploads/Classificatiemodel\\_2018.pdf](https://www.wcs.nl/wp-content/uploads/Classificatiemodel_2018.pdf) (insert link to pdf file)

| Afmeting   | Artikelnr       | Zi nummer | Inhoud  | AIP ex btw |
|------------|-----------------|-----------|---------|------------|
| 10 x 10 cm | MA-152-RATG-119 |           | 5 stuks | € 85,00    |

**User information global put here**